

平成 20 年 6 月 1 日 (第 1 版)
平成 20 年 7 月 30 日(第 2 版)
平成 22 年 4 月 28 日(第 3 版)
平成 22 年 12 月 20 日(第 4 版)
平成 23 年 12 月 8 日(第 5 版)

オートクレーブ滅菌対応 エスマルヒ バンデージ

洗浄・消毒・滅菌に関する取扱説明

オートクレーブ滅菌が可能で、ラテックスフリーのエスマルヒバンデージです！

カタログ番号	品名
20-20-060	エスマルヒ バンデージ オートクレーブ 6cm
20-20-080	エスマルヒ バンデージ オートクレーブ 8cm
20-20-100	エスマルヒ バンデージ オートクレーブ 10cm
20-20-120	エスマルヒ バンデージ オートクレーブ 12cm
20-20-150	エスマルヒ バンデージ オートクレーブ 15cm

(出荷単位:5m 長×2 巻/箱)

【洗浄】


オートクレーブ滅菌対応エスマルヒバンデージは泡立ち石鹼や中性洗剤で洗浄して下さい。但し表面を傷付ける硬いブラシや研磨剤を含んだ洗浄用具は絶対にご使用しないで下さい。ご使用になった洗剤が全く残らないように、リンス水で十分洗い流して下さい。尚、オートクレーブ滅菌対応エスマルヒバンデージは、60℃未満の温水での洗濯機による洗浄が可能です。

【消毒】

消毒は、ゴム製品に対して使用可能とされている市販の適切な中性の消毒剤をご使用して下さい。強アルカリ性の消毒剤をご使用になりますと縮み等が発生する可能性がございます。また、フェノールもしくはフェノールに類似の混合剤は絶対にご使用にならないで下さい。厳禁です。消毒剤が全く残らないように、リンス水で十分洗い流して下さい。

【滅菌】

このエスマルヒバンデージは 134℃未満でオートクレーブ滅菌が可能です。頻繁なオートクレーブ滅菌は自然の老化現象を促進し、製品の寿命を減少させることをご承知下さい。滅菌方法としては、下記の画像のようにガーゼを挿入して下さい。

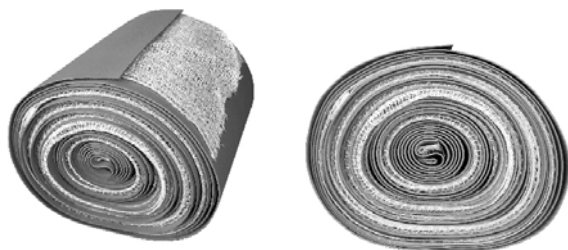

CBC 株式会社

東京都中央区月島 2-15-13

TEL : 03-3536-4831

平成 20 年 6 月 1 日 (第 1 版)
平成 20 年 7 月 30 日(第 2 版)
平成 22 年 4 月 28 日(第 3 版)
平成 22 年 12 月 20 日(第 4 版)
平成 23 年 12 月 8 日(第 5 版)

【警告】

表面に特殊処理を施しておりますので切断致しますと切断面は無処理となりますので劣化の原因となります。金属、有機溶剤、油脂もしくはグリースへの接触は避けて下さい。特に先端部が鋭利な医療機器等と搬送、保管、洗浄、オートクレーブ滅菌を一緒に行わないで下さい。このエスマルヒバンテージに接触後、ピンホールを発生させ、裂ける原因となります。